

RIDA® QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent

REF ZN1004



R-Biopharm AG, An der neuen Bergstrasse 17, 64297 Darmstadt, Almanya

+49 (0) 61 51 81 02-0 / +49 (0) 61 51 81 02-20 / www.r-biopharm.com



1. Kullanım amacı

In vitro tanı amaçlı kullanım içindir. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003) hızlı testle test edilmiş gastroenterit belirtileri gösteren kişilerden alınan işlenmemiş insan gaita örneklerinin seyreltilmesine yöneliktir.

Ürün, profesyonel kullanıma yöneliktir.

2. Testin özeti ve açıklaması

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, RIDA®QUICK Test için bir aksesuar olarak sunulmaktadır (bkz. Bölüm 1. Kullanım amacı).

3. Test prensibi

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003) hızlı testleri için kullanıma hazır örnek seyreltme tamponu içerir.

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003) hızlı testiyle kullanılmadan önce gaita örneklerini seyreltmekte kullanılır.

4. Sağlanan reaktifler

Tek bir paket, 25 örnek seyreltme tamponu flakonu içerir.

Tablo 1: Sağlanan reaktifler

Kit bileşenleri	Miktar		Açıklama
Tube Sarı kapak	25 ×	1,5 mL	Örnek seyreltme tamponu; kullanıma hazır

5. Saklama talimatları

Lütfen Tablo 2'deki kullanma ilkelerini izleyin ve ürünü kullandıktan hemen sonra belirtilen bilgilere göre saklayın. Son kullanma tarihi geçtikten sonra veya açılmış ürünlerin önerilen saklama süresi dolduktan sonra, kalite garantisi artık geçerli değildir.

Tablo 2: Saklama koşulları ve bilgileri

	Saklama sıcaklığı	Maksimum saklama süresi	Saklamaya ilişkin ek notlar
açılmamış	2 - 30 °C	Basılı son kullanma tarihine kadar kullanılabilir	-
açılmış	2 - 30 °C	Basılı son kullanma tarihine kadar kullanılabilir	Açılmış flakonlar veya kapakları gevşetilmiş flakonlar saklanmamalıdır ve atılmalıdır.

6. Gerekli olan ama sağlanmayan reaktifler

6.1 Reaktifler

Reaktifler
RIDA®QUICK Rotavirus
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi

6.2 Laboratuvar ekipmanları

RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı test için gerekli laboratuvar ekipmanları, testi gerçekleştirmek için gereklidir.

7. Kullanıcılar için uyarılar ve önlemler

Yalnızca yetkili laboratuvar personeli bu ürünü kullanabilir.

Tıbbi laboratuvarlarda çalışma yönergelerine (iyi laboratuvar uygulamaları) uyulmalıdır. RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı testini kullanırken kullanım talimatlarına kesinlikle uyun. Örnekleri veya reaktifleri ağızınızı kullanarak pipetlemeyin. Yaralı ciltle veya mukoz membranlarla temasını önleyin. Reaktifleri ve örnekleri kullanırken kişisel koruyucu ekipmanlar (uygun eldivenler, laboratuvar önlüğü, güvenlik gözlükleri) kullanın ve ürünü kullanmayı bitirdikten sonra ellerinizi yıkayın. Örneklerin kullanılmakta olduğu alanlarda sigara içmeyin, bir şey yemeyin veya içmeyin.

Tehlikeli maddeler, etiketleme yükümlülüklerine göre belirtilmiştir.

Güvenlik Veri Formlarına (Safety Data Sheet, SDS) ilişkin daha fazla ayrıntı, <https://clinical.r-biopharm.com/search/> adresindeki öge numarasında bulunmaktadır.

Kullanıcılar, kullanıldıktan sonra RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent ürününün uygun şekilde bertarafından sorumludur. Bertaraf için, lütfen ulusal yönetmeliklere uyun.

Örnek seyreltme sırasında doğru örnek miktarının kullanıldığından ve örnek uygulama sırasında örnek seyreltme tamponuna ekstrakte edilmiş örnek miktarının doğru olduğundan emin olun.

Avrupa Birliđi'ndeki kullanıcılar için: Ürünle ilişkili tüm ciddi advers olayları R-Biopharm AG ve uygun ulusal makamlara bildirin.

8. Test prosedürü

Kullanmadan önce, RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent ürününü oda sıcaklığına (20 - 25 °C) getirin.

Numune test etmek için, test kasetlerini RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı testinin kullanım talimatlarında açıklandığı gibi hazırlayın.

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent ürününü, örnek seyreltme tamponunu [Tube] içeren flakon, kullanılmadan önce hasar görmüşse veya mühürlü değilse kullanmayın.

Çapraz kontaminasyonu genel olarak önleyin.


Zaten kullanılmış olan örnek seyreltme tamponu [Tube] flakonlarını yeniden kullanmayın.

8.1 Örnek seyreltme

Örnek seyreltme tamponunun [Tube] vidalı kapađını dikkatle açın.

Katı veya yarı katı gaita

Gaita katıysa veya yarı-katıysa, yaklaşık 50 - 100 mg örnek toplamak için vidalı kapađa takılı olan aplikatör çubuđunun oluklu ucunu (Şekil 1) kullanın.

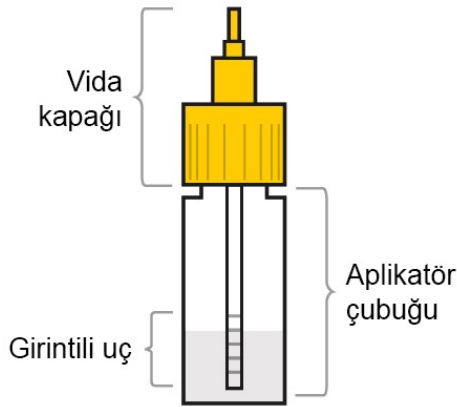

Şekil 1: Örnek seyreltme tamponunun [Tube] tasarımı

Not: Olabildiğince temsilci olan bir örnek elde etmek için en az üç farklı örnek alanından örnek toplayın.

Örnek bulunan aplikatör çubuđunu, örnek seyreltme tamponunun [Tube] içine yerleřtirin. Vidalı kapađı sıkıca kapatın ve homojen bir süspansiyon elde etmek için iyice karıřtırın.






Sıvı veya yarı sıvı gaita

Gaita sıvı veya yarı sıvıysa, RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ile birlikte verilen tek kullanımlık pipeti kullanarak örnekten 100 µL toplayın (ikinci çıkıntının hemen üstü) ve bunu örnek seyreltme tamponuna **Tube** ekleyin. Vidalı kapağı sıkıca kapatın ve homojen bir süspansiyon elde etmek için iyice karıştırın.

8.2 Örnek test etme

Homojen örnek süspansiyonu, artık RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı testlerinin kullanım talimatlarına göre kullanılabilir. Vidalı kapağın ucunu kırıp kopartın. Örnek seyreltme tamponunu **Tube** örnek uygulama alanının üzerinde dik tutun ve test kasetinin açıklığının içerisine 4 damla uygulayın. Test sonucunu okumak için 5 dakika bekleyin. Değerlendirme için, lütfen RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı testinin kullanım talimatlarına başvurun.

8.3 Kısa protokol

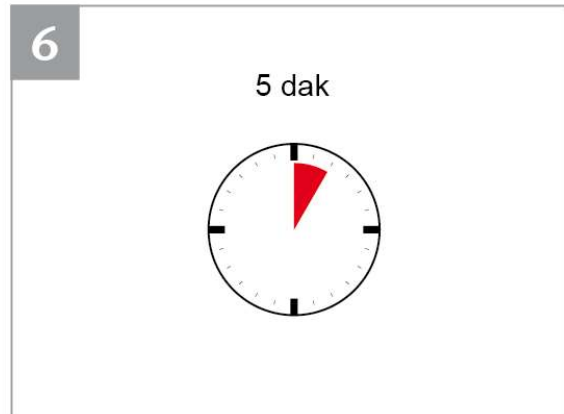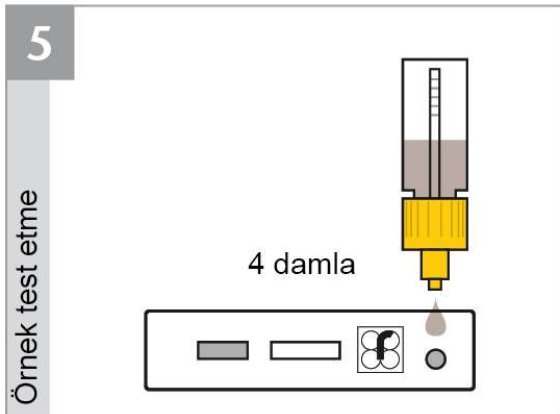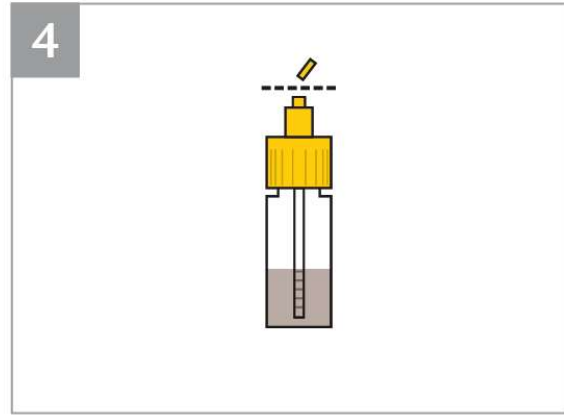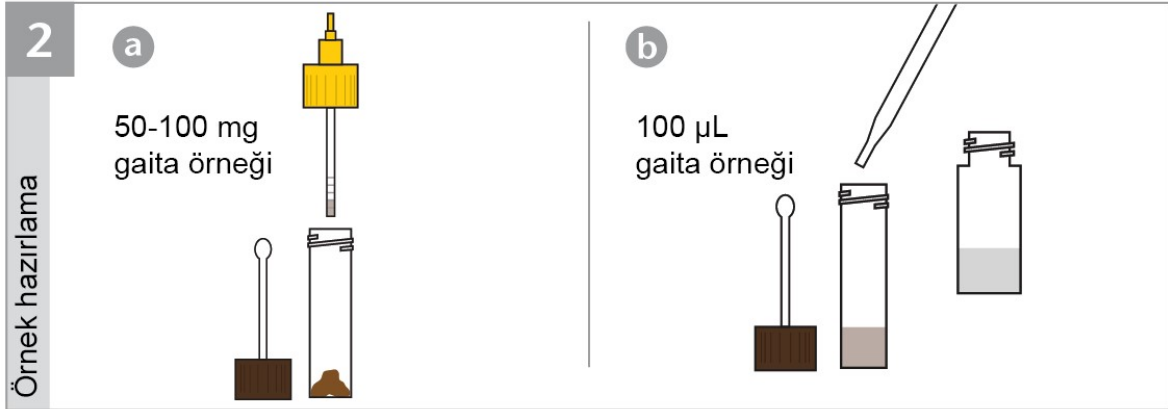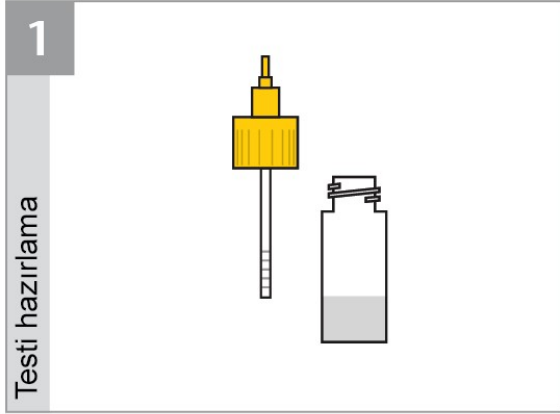

1. Örnek seyreltme tamponunun **Tube** vidalı kapağını açın.
2. Örneğin, örnek tamponunda seyreltme:
 - a. **Katı gaita örneği:** 50 - 100 mg gaita örneği toplamak için aplikatör çubuğunu kullanın.
 - b. **Sıvı gaita örneği:** 100 µL sıvı gaita örneği toplamak için, RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı testinin tek kullanımlık pipetini kullanın.
3. Vidalı kapağı sıkıca kapatın ve homojen bir süspansiyon elde edene kadar iyice karıştırın.
4. Vidalı kapağın ucunu kırıp kopartın.
5. RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus kasetinin örnek uygulama alanına 4 damla dağıtın.
6. 5 dakika bekleyin ve ardından sonucu okuyun.

9. Yöntemin sınırlamaları













1. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, yalnızca RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı testle birlikte kullanılmaya yöneliktir.
2. Bu ürün, iyi laboratuvar uygulamalarına (GLP) ilişkin yönetmeliğe uygun olarak kullanılmalıdır. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent ürününü kullanırken, kullanıcılar RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı testler için üreticilerin talimatlarına kesinlikle uymalıdır.

10. Sürüm geçmişi

Sürüm numarası	Bölüm ve adlandırma
2011-08-11	Önceki sürüm
2022-01-07	Genel revizyon ve bölüm yapısının tanıtımı

11. Simgelerin açıklamaları

Genel simgeler

	İn vitro tanı amaçlı kullanım içindir
	Kullanım kılavuzuna uyun
	Parti numarası
	Son kullanma tarihi
	Saklama sıcaklığı
	Madde numarası
	Test sayısı
	Üretim tarihi
	Üretici firma
	Ürün, kişisel kullanıma yönelik değildir
	Ürün, bakım noktasında teste yönelik değildir
	Yeniden kullanmayın

Teste özel simgeler

	Örnek seyreltme tamponu
---	-------------------------