

**RIDASCREEN® Diluent | 1**

**REF** 3010P01-VK



## 1. Zamýšľané použitie

Na diagnostické použitie *in vitro*. Riediaci roztok RIDASCREEN® **Diluent | 1** (3010P01-VK) je puľrovací roztok na riedenie vzoriek určený na použitie s testom RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin (C0601), RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH (C0701), RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B (C0801), RIDASCREEN® Rotavirus (C0901), RIDASCREEN® Adenovirus (C1001), RIDASCREEN® Giardia (C1101), RIDASCREEN® Cryptosporidium (C1201), RIDASCREEN® Astrovirus (C1301), RIDASCREEN® Norovirus 3<sup>rd</sup> Generation (C1401), RIDASCREEN® Entamoeba (C1701), RIDASCREEN® Helicobacter (C2302) a RIDASCREEN® Campylobacter (C2401).

Produkt je určený na profesionálne použitie.

## 2. Zhrnutie a vysvetlenie testu

Riediaci roztok RIDASCREEN® **Diluent | 1** sa ponúka ako príslušenstvo k testom RIDASCREEN® (pozrite si časť 1. Zamýšľané použitie).

## 3. Princíp testu

Riediaci roztok RIDASCREEN® **Diluent | 1** je pripravený na použitie a musí sa používať tak, ako je to opísané v návode na použitie testu RIDASCREEN® (pozrite si časť 1. Zamýšľané použitie).

Riediaci roztok RIDASCREEN® **Diluent | 1** sa používa na zriedenie vzoriek stolice pred použitím v testoch RIDASCREEN®.

## 4. Dodané činidlá

**Tabuľka 1:** Činidlá, ktoré sú súčasťou riediaceho roztoku RIDASCREEN®

**Diluent | 1**

Súčasť súpravy	Množstvo		Opis
<b>Diluent   1</b> <i>Veko s prirodzeným sfarbením</i>	1 ×	100 mL	Puľrovací roztok na riedenie vzoriek 1, roztok NaCl puľrovaný proteínom, pripravený na použitie, modré sfarbenie; obsahuje Kathon CG

## 5. Pokyny na skladovanie

Postupujte podľa usmernení na manipuláciu v tabuľke 2 a produkt uskladnite priamo po použití podľa uvedených informácií. Po uplynutí dátumu expirácie alebo po uplynutí odporúčanej doby skladovania otvoreného produktu stráca záruka kvality platnosť.

**Tabuľka 2:** Podmienky skladovania a informácie

	Teplota skladovania	Maximálna doba skladovania	Dodatočné poznámky k skladovaniu
neotvorené	2 - 8 °C	Možno použiť do vytlačeného dátumu expirácie	-
otvorené	2 - 8 °C	≤ 5 týždňov	Všetky nepotrebné činidlá ihneď uskladnite v chladničke.

## 6. Činidlá, ktoré sa vyžadujú, ale nie sú súčasťou dodávky

### 6.1 Činidlá

#### Činidlá

Test RIDASCREEN® (pozrite si časť 1. Zamýšľané použitie)

### 6.2 Laboratórne vybavenie

Na vykonanie testu je potrebné laboratórne vybavenie potrebné pre test RIDASCREEN® (pozrite si časť 1. Zamýšľané použitie).

## 7. Varovania a bezpečnostné opatrenia pre používateľov

Tento produkt smie používať iba kvalifikovaný laboratórny personál. Musia sa dodržiavať usmernenia pre prácu v zdravotníckych laboratóriách (správna laboratórna prax). Pri vykonávaní testov RIDASCREEN® dôkladne dodržiavajte návod na obsluhu. Nepipetujte vzorky ani činidlá ústami. Zabráňte kontaktu s porušenou pokožkou a sliznicami. Pri manipulácii s činidlami a vzorkami noste osobné ochranné prostriedky (vhodné rukavice, laboratórny plášť, ochranné okuliare) a po použití produktu si umyte ruky. V priestoroch, kde sa manipuluje so vzorkami, nefajčite, nejedzte ani nepite.

Nebezpečné materiály sú označené podľa povinnosti označovania.

Ďalšie podrobnosti o karte bezpečnostných údajov (Safety Data Sheet, SDS) nájdete pod číslom položky na stránke <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Roztok na riedenie vzoriek 1 obsahuje Kathon CG. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a sliznicami.

Používatelia sú zodpovední za správnu likvidáciu riediaceho roztoku RIDASCREEN® Diluent | 1 po použití. Pri likvidácii dodržiavajte národné predpisy.

Pre používateľov v Európskej únii: Všetky závažné nežiaduce udalosti spojené s produktom nahláste spoločnosti R-Biopharm AG a príslušným národným orgánom.

## 8. Postup testovania

Pred použitím zohrejte riediaci roztok RIDASCREEN® Diluent | 1 na izbovú teplotu (20 - 25 °C).

Riediaci roztok RIDASCREEN® Diluent | 1 sa musí používať tak, ako je to opísané v návode na použitie testov RIDASCREEN® (pozrite si časť 1. Zamýšľané použitie).

## 9. Limitácie metódy










1. Riediaci roztok RIDASCREEN® Diluent | 1 je určený len na použitie s uvedenými testami RIDASCREEN® (pozrite si časť 1. Zamýšľané použitie).
2. Tento produkt sa musí používať v súlade s nariadením o správnej laboratórnej praxi (SLP). Pri používaní riediaceho roztoku RIDASCREEN® Diluent | 1 musí obsluha dôsledne dodržiavať pokyny výrobcu príslušného testu RIDASCREEN®.

## 10. História verzie


Číslo verzie	Časť a označenie
2021-12-29	Verzia vydania

## 11. Vysvetlenie symbolov

### Všeobecné symboly

	Na diagnostické použitie <i>in vitro</i>
	Dodržiavajte návod na obsluhu
	Číslo šarže
	Použite pred
	Teplota skladovania
	Číslo položky
	Počet testov
	Dátum výroby
	Výrobca

### Symbole špecifické pre daný test

	Pufrovací roztok na riedenie vzoriek 1
---	--