

**RIDASCREEN® Diluent | 1**

**REF** 3010P01-VK



## 1. Avsedd användning

För *in vitro*-diagnostisk användning. RIDASCREEN® Diluent | 1 (3010P01-VK) är en provspädningsbuffert avsedd att användas med testen RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin (C0601), RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH (C0701), RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B (C0801), RIDASCREEN® Rotavirus (C0901), RIDASCREEN® Adenovirus (C1001), RIDASCREEN® Giardia (C1101), RIDASCREEN® Cryptosporidium (C1201), RIDASCREEN® Astrovirus (C1301), RIDASCREEN® Norovirus 3<sup>rd</sup> Generation (C1401), RIDASCREEN® Entamoeba (C1701), RIDASCREEN® Helicobacter (C2302) och RIDASCREEN® Campylobacter (C2401).

Produkten är avsedd för yrkesmässig användning.

## 2. Sammanfattning och förklaring av testet

RIDASCREEN® Diluent | 1 erbjuds som ett tillbehör till testen från RIDASCREEN® (se Avsnitt 1. Avsedd användning).

## 3. Testprincip

RIDASCREEN® Diluent | 1 är redo för användning och måste användas enligt beskrivningen i instruktionerna för testen från RIDASCREEN® (se Avsnitt 1. Avsedd användning).

RIDASCREEN® Diluent | 1 används för utspädning av avföringsprov före användning i testen från RIDASCREEN®.

## 4. Reagenser som ingår

**Tabell 1:** Reagenser som tillhandahålls för RIDASCREEN® Diluent | 1

Satsens komponenter	Mängd		Beskrivning
Diluent   1 <i>Naturfärgat lock</i>	1 ×	100 mL	Provspädningsbuffert 1, proteinbuffrad NaCl-lösning, redo att användas, blåfärgad, innehåller kathon CG

## 5. Förvaringsanvisningar

Följ hanteringsanvisningarna i tabell 2 och förvara produkten direkt efter användning enligt den angivna informationen. Efter att utgångsdatumet har passerat eller den rekommenderade förvaringsperioden för den öppnade produkten har förflutit är kvalitetsgarantin inte längre giltig.

**Tabell 2:** Förvaringsförhållanden och information

	Lagringstemperatur	Maximal lagringstid	Kompletterande anmärkningar om förvaring
oöppnad	2 - 8 °C	Kan användas fram till angivet utgångsdatum	-
öppnad	2 - 8 °C	≤ 5 veckor	Reagenser som inte behövs ska omedelbart sättas i kylskåp.

## 6. Nödvändiga reagenser som inte medföljer

### 6.1 Reagenser

Reagenser
RIDASCREEN® test (se Avsnitt 1. Avsedd användning)

### 6.2 Laboratorieutrustning

Laboratorieutrustningen som behövs för ett test från RIDASCREEN® krävs för att testet ska kunna utföras (se Avsnitt 1. Avsedd användning).

## 7. Varningar och försiktighetsåtgärder för användare

Endast kvalificerad laboratoriepersonal får använda denna produkt. Riktlinjerna för arbete i medicinska laboratorier (god laboratoriesed) måste följas. Följ bruksanvisningen strikt när du utför tester från RIDASCREEN®. Pipettera inte prover eller reagenser med munnen. Undvik kontakt med skadad hud och slemhinnor. Använd personlig skyddsutrustning (lämpliga handskar, labbrock, skyddsglasögon) vid hantering av reagenser och prover och tvätta händerna efter avslutad användning av produkten. Rök, ät eller drick inte i områden där prover eller testreagenser hanteras.

Farliga material indikeras i enlighet med föreskrifter på märkningen. Ytterligare information om säkerhetsdatabladen (Safety Data Sheet, SDS) finns under artikelnumret på <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Provspädningsbuffert 1 innehåller kathon CG. Undvik kontakt med hud och slemhinnor.

Användarna ansvarar för korrekt bortskaffande av RIDASCREEN® Diluent | 1 efter användning. Följ nationella förordningar om kassering.

För användare i Europeiska unionen: Rapportera alla allvarliga negativa händelser som förknippas med produkten till R-Biopharm AG och relevanta nationella myndigheter.

## 8. Testprocedur

Låt RIDASCREEN® Diluent | 1 uppnå rumstemperatur (20 - 25 °C) innan användning.

RIDASCREEN® Diluent | 1 måste användas enligt beskrivningen i instruktionerna för testen från RIDASCREEN® (se Avsnitt 1. Avsedd användning).

## 9. Metodens begränsningar










1. RIDASCREEN® Diluent | 1 är enbart avsedda att användas med nämnda test från RIDASCREEN® (se Avsnitt 1. Avsedd användning).
2. Denna produkt bör användas i enlighet med förordningen om god laboratoriesed( GLP). Vid användning av RIDASCREEN® Diluent | 1 måste användarna följa tillverkarens instruktioner för RIDASCREEN® testet noggrant.

## 10. Versionshistorik

Versionsnummer	Avsnitt och benämning
2021-12-29	Utgivningsversion

## 11. Symbolförklaringar

### Allmänna symboler

	För <i>in-vitro</i> -diagnostisk användning
	Se användarhandboken
	Batchnummer
	Använd före
	Förvaringstemperatur
	Artikelnummer
	Antal tester
	Tillverkningsdatum
	Tillverkare

### Testspecifika symboler

	Provspädningsbuffert 1
---	------------------------