

**RIDASCREEN® Wash buffer 10x**

**REF** 3029P00-VK



## 1. Tiltenkt bruk

For *in vitro*-diagnostisk bruk. RIDASCREEN® Wash buffer 10x (3029P00-VK) er en vaskebuffer beregnet for bruk med RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin (C0601), RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH (C0701), RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B (C0801), RIDASCREEN® Rotavirus (C0901), RIDASCREEN® Adenovirus (C1001), RIDASCREEN® Giardia (C1101), RIDASCREEN® Cryptosporidium (C1201), RIDASCREEN® Astrovirus (C1301), RIDASCREEN® Norovirus 3<sup>rd</sup> Generation (C1401), RIDASCREEN® Entamoeba (C1701), RIDASCREEN® Verotoxin (C2201), RIDASCREEN® Helicobacter (C2302), RIDASCREEN® Campylobacter (C2401), RIDASCREEN® Legionella (C8001), RIDASCREEN® α1-Antitrypsin (G09034), RIDASCREEN® sIgA (G09035), og testen RIDASCREEN® Calprotectin (G09036).

Produktet er tiltenkt for profesjonell bruk.

## 2. Sammendrag og forklaring av testen

RIDASCREEN® Wash buffer 10x tilbys som tilbehør til RIDASCREEN®-testene (se avsnitt 1. Tiltenkt bruk).

## 3. Testprinsipp

RIDASCREEN® Wash buffer 10x er konsentrert 10 ganger og må brukes som beskrevet i bruksanvisningen for RIDASCREEN®-testene (se avsnitt 1. Tiltenkt bruk).

RIDASCREEN® Wash buffer 10x brukes til vasking av RIDASCREEN® mikrotiterplate.

## 4. Medfølgende reagenser

**Tabell 1:** Reagenser gitt for RIDASCREEN® Wash buffer 10x

Settkomponenter	Mengde		Beskrivelse
Wash buffer 10x Brunt lokk	1 x	100 mL	Vaskebuffer, fosfatbufret NaCl-oppløsning (konsentrert 10 ganger); inneholder timerosal

## 5. Oppbevaringsinstruksjoner

Følg retningslinjene for håndtering i tabell 2 og lagre produktet direkte etter bruk i henhold til angitt informasjon. Når utløpsdatoen er overskredet eller den anbefalte lagringsperioden for det åpnete produktet har utløpt, er ikke kvalitetsgarantien lenger gyldig.

RIDASCREEN® Wash buffer 10x leveres som 10 ganger konsentrat og må fortynnes med destillert eller avionisert vann 1:10 før bruk (1 del Wash buffer 10x med 9 deler destillert eller avionisert vann). Eventuelle krystaller i konsentratet bør løses opp på forhånd ved oppvarming (vannbad ved 37 °C).

**Tabell 2:** Oppbevaringsforhold og informasjon

	Oppbevaringstemperatur	Maksimal lagringstid	Tilleggsmerknader om oppbevaring
uåpnet	2 - 8 °C	Kan brukes frem til den angitte utløpsdatoen	-
åpnet	2 - 8 °C	≤5 uker	Oppbevar ethvert reagens som ikke trengs umiddelbart i kjøleskap.
fortynnet vaskebuffer	2 - 8 °C 20 - 25 °C	≤ 4 uker ≤ 6 dager	-

## 6. Nødvendige reagenser som ikke medfølger

### 6.1 Reagenser

#### Reagenser

RIDASCREEN®-test (se avsnitt 1. Tiltent bruk)

### 6.2 Laboratorieutstyr

Laboratorieutstyret som trengs FOR RIDASCREEN®-testen er nødvendig for å utføre testen (se avsnitt 1. Tiltent bruk).

## 7. Advarsler og forsiktighetsregler for brukerne

Kun kvalifisert laboratoriepersonell skal bruke dette produktet.

Retningslinjene for arbeid i medisinske laboratorier (god laboratoriepraksis) må følges. Følg bruksanvisningen nøye når du utfører RIDASCREEN®-testene. Ikke pipettér prøver eller reagenser med munnen. Unngå kontakt med ødelagt hud og slimhinner. Bruk personlig verneutstyr (passende hansker, labfrakk, vernebriller) når du håndterer reagenser og prøver, og vask hendene når du er ferdig med å bruke produktet. Ikke røyk, spis eller drikk i områder der prøver behandles.

Farlige materialer er angitt i samsvar med kravene til merking.

Ytterligere informasjon om sikkerhetsdatabladet (Safety Data Sheet, SDS) finnes under varenummeret på <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Vaskebufferen inneholder thimerosal som konserveringsmiddel. Unngå kontakt med hud eller slimhinner.

Brukere er ansvarlige for riktig avhending av RIDASCREEN® Wash buffer 10x etter bruk. Følg nasjonale forskrifter for avhending.

For brukere i Den europeiske union: Rapportert alle alvorlige bivirkninger forbundet med produktet til R-Biopharm AG og relevante nasjonale myndigheter.

## 8. Testprosedyre

Før bruk, bring RIDASCREEN® Wash buffer 10x til romtemperatur (20 - 25 °C). RIDASCREEN® Wash buffer 10x må brukes som beskrevet i bruksanvisningen FOR RIDASCREEN®-testene (se avsnitt 1. Tiltent bruk).

## 9. Metodens begrensninger










1. RIDASCREEN® Wash buffer 10x er bare for bruk med de nevnte RIDASCREEN®-testene (se avsnitt 1. Tiltent bruk).
2. Dette produktet skal brukes i samsvar med forskriften om god laboratoriepraksis (GLP). Ved bruk av RIDASCREEN® Wash buffer 10x, må operatørene nøyaktig følge produsentens instruksjoner for RIDASCREEN®-testen.

## 10. Versjonshistorikk

Versjonsnummer	Avsnitt og betegning
2021-12-29	Utgivelsesversjon

## 11. Symbolforklaring

### Generelle symboler

	For <i>in vitro</i> -diagnostisk bruk
	Følg brukerhåndboken
	Batchnummer
	Brukes innen
	Oppbevaringstemperatur
	Artikkelnummer
	Antall tester
	Produksjonsdato
	Produsent

### Testspesifikke symboler

	Vaskebuffer (konsentrert 10-ganger)
---	-------------------------------------