

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x

REF 3096P00-VK



1. Zweckbestimmung

Für die *In-vitro*-Diagnostik. Der RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x (3096P00-VK) ist als Waschpuffer für die Verwendung mit dem RIDASCREEN® IFX Monitoring (G09041), RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies (G09042), RIDASCREEN® ADM Monitoring (G09043), RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies (G09044), RIDASCREEN® VDZ Monitoring (G09045), RIDASCREEN® GLM Monitoring (G09047) und RIDASCREEN® UST Monitoring (G09049) Test bestimmt.

Das Produkt ist für die professionelle Anwendung vorgesehen.

2. Zusammenfassung und Erklärung des Tests

Der RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x wird als Zubehör für die RIDASCREEN® Tests (siehe Kapitel 1. Zweckbestimmung) angeboten.

3. Testprinzip

Der RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x ist 20-fach konzentriert und muss, wie in der Gebrauchsanweisung der RIDASCREEN® Tests (siehe Kapitel 1. Zweckbestimmung) beschrieben, verwendet werden.

Die RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x wird zum Waschen der RIDASCREEN® Mikrotiterplatte eingesetzt.

4. Packungsinhalt

Tab. 1: Packungsinhalt RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x

Kitkomponente	Menge		Beschreibung
TDM Wash buffer 20x <i>Transparenter Deckel</i>	1 x	50 ml	Waschpuffer, Detergenz in Phosphatpuffer-Lösung und antimikrobielle Agentien (20-fach konzentriert)

5. Reagenzien und ihre Lagerung

Bitte folgen Sie den Handhabungsvorgaben in Tabelle 2 und lagern Sie das Produkt unmittelbar nach Verwendung gemäß den aufgeführten Angaben. Nach Erreichen des Verfallsdatums oder der empfohlenen Lagerungsdauer des geöffneten Produktes kann keine Qualitätsgarantie mehr übernommen werden.

Der RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** wird 20-fach konzentriert ausgeliefert und muss vor der Verwendung mit destillierten oder deionisierten Wasser 1:20 verdünnt werden (Hierfür werden 50 ml des Konzentrats in einen 1000 ml Messzylinder gegeben und mit destilliertem Wasser auf 1000 ml aufgefüllt).

Tab. 2: Lagerungsbedingungen und -hinweise

	Lager- temperatur	Maximale Lagerzeit	Zusätzliche Hinweise zur Lagerung
ungeöffnet	2 - 8 °C	Bis zum aufgedruck- ten Verfallsdatum verwendungsfähig	–
verdünnter Waschpuffer	2 - 8 °C	≤ 4 Wochen	–

6. Zusätzlich benötigte Reagenzien – erforderliches Zubehör

6.1 Reagenzien

Reagenzien
RIDASCREEN® Test (siehe Kapitel 1. Zweckbestimmung)

6.2 Laborzubehör

Für die Testdurchführung wird das für den RIDASCREEN® Test (siehe Kapitel 1. Zweckbestimmung) erforderliche Laborzubehör benötigt.

7. Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt ist nur von qualifiziertem Laborpersonal zu verwenden. Die Richtlinien zur Arbeit in medizinischen Laboratorien (Gute Laborpraxis) sind zu beachten. Die Gebrauchsanweisung zur Durchführung der RIDASCREEN® Tests ist strikt einzuhalten. Proben oder Reagenzien nicht mit dem Mund pipettieren. Kontakt mit verletzter Haut oder Schleimhäuten vermeiden. Während des Umgangs mit Reagenzien und Proben, persönliche Schutzausrüstung (geeignetes Handschuhmaterial, Kittel, Schutzbrille) tragen und nach Abschluss der Verwendung des Produktes die Hände waschen. In Bereichen, in denen mit Proben gearbeitet wird, nicht rauchen, essen oder trinken.

Gefahrstoffangabe gemäß Kennzeichnungspflicht.

Weitere Details zum Safety Data Sheet (SDS) finden Sie unter der Artikelnummer auf <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Der RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** muss nach Gebrauch sachgerecht und eigenverantwortlich entsorgt werden. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung die jeweils national geltenden Vorschriften.

Für Anwender in der Europäischen Union: Im Zusammenhang mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfälle sind der R-Biopharm AG und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.

8. Testdurchführung

Vor Verwendung ist der RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** auf Raumtemperatur (20 - 25 °C) zu bringen. Der RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** muss, wie in der Gebrauchsanweisung der RIDASCREEN® Tests (siehe Kapitel 1. Zweckbestimmung) beschrieben, verwendet werden.

9. Grenzen der Methode










1. Der RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** ist nur zur Verwendung mit den genannten RIDASCREEN® TDM Tests vorgesehen (siehe Kapitel 1 Zweckbestimmung).
2. Dieses Produkt sollte gemäß der GLP-Verordnung (Gute Laborpraxis) verwendet werden. Der Anwender muss bei Verwendung des RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** die Anweisungen des Herstellers für den RIDASCREEN® Test genau befolgen.

10. Versionsübersicht

Versionsnummer	Kapitel und Bezeichnung
2021-12-09	Freigabeversion

11. Symbolerklärung

Allgemeine Symbole

	<i>In-vitro</i> -Diagnostikum
	Gebrauchsanweisung beachten
	Chargennummer
	verwendbar bis
	Lagertemperatur
	Artikelnummer
	Anzahl Tests
	Herstelldatum
	Hersteller

Testspezifische Symbole

	Waschpuffer (20-fach konzentriert)
---	------------------------------------